



Recogida de muestras

Qué farmacos debo retirar para poder hacer pruebas de alergia	Deben retirarse corticoides vía sistémica y ciclosporina durante 3-4 semanas. Corticoides tópicos e inhalados, retirar durante 7-10 días.
Qué farmacos puede tomar para poder hacer pruebas de alergia	No interfieren en las pruebas de alergia Apoquel® y Cytopoint®. Los antihistamínicos y los antibióticos también se pueden administrar.
Qué edad mínima debe tener un animal para realizar las pruebas de alergia	1 año.
Debo retirar el antibiótico para hacer un cultivo	Sí, durante un periodo de 1 semana.
Para realizar una biopsia, debo retirar algún fármaco	Para realizar una biopsia se debe administrar 1 semana de antibiótico y retirar durante 7-10 días los corticoides
Qué tipo de muestra puedo enviar para las pruebas de alergia	Suero, plasma o sangre entera (1,5 ml de suero o 3 ml de sangre entera). Puedes utilizar cualquier tipo de tubo.
Qué tipo de hisopo debo utilizar para enviar un cultivo bacteriológico	Un hisopo estéril con medio de cultivo.
Cómo debo enviar un biopsia	En formol al 10%.
Cómo puedo pedir material para el envío de la muestras	En la zona clientes (https://clientes.saludanimal.leti.com/)
Cuáles son nuestras mensajerías	• NACEX, telf. 93 223 86 20, abonado 2208 (consulta otras mensajerías)
Cuál es nuestro horario de atención al cliente	Lunes a jueves de 8:30 h a 17:30 h y los viernes de 8 a 16 h. No recibimos muestras los sábados. Vísperas de festivos de 8 a 16 h. Durante el mes de agosto y vísperas de festivos de 8 a 15 h.
Qué tengo que hacer si tengo que enviar las muestras el viernes	Las muestras para pruebas de alergia, <i>Leishmania</i> o biopsia no se estropean durante el fin de de semana. Si es un cultivo bacteriológico lo ideal es no enviarlo, ya que no nos llegará hasta el lunes. Si la muestra se recoge el viernes, enviarla con acumuladores de frío y siempre con medio de cultivo. Si la muestra se recoge en sábado, mantenerla en la nevera con el medio de cultivo y el lunes antes de enviarla cambiar el medio de cultivo de transporte por uno nuevo.
Es preciso enviar las muestras refrigeradas	Las muestras de suero, biopsias y cultivos que lleguen en 24 h no requieren refrigeración.
Qué prueba de alergia es mejor en gatos	El Panel Ambiental Allercept felino, ya que con la tecnología del sistema hidrogel es capaz de detectar mejor las inmunoglobulinas en la muestra.
El test de reactividad al alimento en qué casos estaría más indicado	En casos donde exista la sospecha de una intolerancia alimentaria.
Para poder realizar una inmunoterapia, qué tipo de prueba debo realizar	Primero es aconsejable realizar un <i>screening</i> ambiental para valorar si el animal presenta IgE. En caso afirmativo, se deberá realizar un panel ambiental, donde el resultado que se obtenga será la composición de la vacuna de inmunoterapia.



Resultados

Cómo puedo pedir una ampliación de pruebas	A través del pedido web (https://clientes.saludanimal.leti.com/)
Cómo recibo los resultados	Adjuntos al mail y se pueden descargar en la página web: https://clientes.saludanimal.leti.com/
Cuánto tardan las pruebas en realizarse	<ul style="list-style-type: none">• Alergia: 48-72 h.• Allercept/test reactividad al alimento: 7-10 días.• <i>Leishmania</i>: 24-48 h.• Cultivos microbiológicos: 48-72 h.• Cultivo de hongos: 7 días.• Biopsias: 5 días.
Si tengo dudas sobre una biopsia oncológica dónde puedo dirigirme	Puedes entrar en el servicio de asesoría LetiLab-onco (https://saludanimal.leti.com/es/servicio-de-asesoria-oncologica_110235) y preguntarlo a un experto. En 24-48h obtendrás una respuesta.