

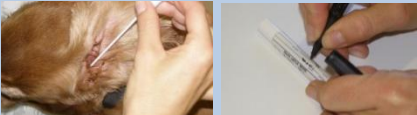


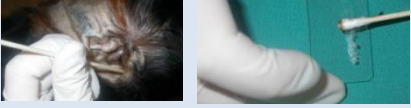
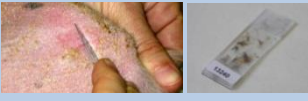



TEST	MUESTRA	VOLUMEN	MATERIAL	OBSERVACIONES	TÉCNICA
SCREENING PANEL UNITEST PANEL ALIMENTOS	SANGRE SUERO PLASMA	3-4ml sangre 1,5 ml suero o plasma	TUBO SECO TUBO EDTA TUBO HEPARINA	Suspensión corticoides y / ciclosporina 4 semanas	
ELISA LEISHMANIA ELISA SARNA SARCÓPTICA	SANGRE SUERO PLASMA	3-4ml sangre 1,5 ml suero o plasma	TUBO SECO TUBO EDTA TUBO HEPARINA	--	
PCR-CUANTITATIVA	SANGRE MÉDULA OSEA ASPIRADO GANGLIO BIOPSIA	1 ml sangre 0,3 ml 0,5 ml Piel	TUBO EDTA TUBO EDTA/SECO TUBO EDTA/SECO SUERO FISIOLÓG.	No serán procesables muestras coaguladas ni enviadas con tubo de heparina	
CULTIVO MICROBIOLÓGICO	PÚSTULA, COLLARETE EPIDÉRMICO, FÍSTULA BIOPSIA	--	HISOPO ÉSTERIL  SUERO FISIOLÓG.	Sin tratamiento antibiótico (sistémico / tópico) durante 1 semana.	
CULTIVO HONGOS (Dermatofitos)	ESCAMAS, PELOS, RASPADOS	--	CONTENEDOR ÉSTERIL	Especificar si está recibiendo tratamiento antifúngico Desinfectar la zona con alcohol	
TRICOGRAMA	PELOS COMPLETOS SOBRE UN PORTA O EN UN CONTENEDOR	--	PORTAOBJETOS CONTENEDOR ESTÉRIL	Depilar en sentido al crecimiento del pelo	
CITOLOGÍAS DE SUPERFICIE / ÓTICAS	EXUDADO CUTÁNEO u ÓTICO, CONTENIDO PÚSTULA	--	PORTAOBJETOS, HISOPOS NO ÉSTERIL, CELO		
RASPADOS CUTÁNEOS	RASPADO SUPERF o PROFUNDO	--	PORTAOBJETOS HOJA BISTURI ACEITE MINERAL		
BIOPSIA	PIEL NEOPLASIA CUTÁNEA	--	CONTENEDOR FORMOL 10%		
CITOLOGÍA DE ASPIRADO DE MASA CUTÁNEA	ASPIRADO	--	PORTAOBJETOS JERINGUILLA	Aspirado de masas cutáneas	