

TESTE	AMOSTRA	VOLUME	MATERIAL	OBSERVAÇÕES	TÉCNICA
SCREENING PAINEL UNITEST PAINEL ALIMENTOS	SANGUE SORO PLASMA	3-4ml sangue 1,5 ml soro ou plasma	TUBO SECO TUBO EDTA TUBO HEPARINA	Suspensão de corticoides e / ciclosporina durante 4 semanas	
ELISA LEISHMANIA ELISA SARNA SARCÓPTICA	SANGUE SORO PLASMA	3-4ml sangue 1,5 ml soro ou plasma	TUBO SECO TUBO EDTA TUBO HEPARINA	--	
HORMONAS (TIROIDE / CORTISOL)	SORO	1 ml	TUBO SECO	Amostras não hemolisadas	
PCR-QUANTITATIVO	SANGUE MEDULA ÓSSEA PUNÇÃO GÂNGLIO BIOPSIA	1 ml sangue 0,3 ml 0,5 ml Pele	TUBO EDTA TUBO EDTA/SECO TUBO EDTA/SECO SORO FISIOLÓG.	Não são processáveis amostras coaguladas ou enviadas com tubo de heparina	
CULTIVO MICROBIOLÓGICO	PÚSTULA, COLARETE EPIDÉRMICO, FÍSTULA BIOPSIA	--	ZARAGATOA ÉSTERIL SORO FISIOLÓG.	Sem tratamento antibiótico (sistémico / tópico) durante 1 semana.	
CULTIVO FUNGOS (Dermatófitos)	ESCAMAS, PÊLOS, RASPAGEM	--	RECIPIENTE ÉSTERIL	Especificar se está a receber tratamento antifúngico Desinfetar a zona com álcool	
TRICOGRAMA	PÊLOS COMPLETOS SOBRE UMA LÂMINA DE MICROSCÓPIO OU NUM RECIPIENTE	--	LÂMINAS DE MICROSCÓPIO OU RECIPIENTE ESTÉRIL	Depilar no sentido do crescimento do pêlo	
CITOLOGIAS DE SUPERFÍCIE / ÓTICAS	EXUDADO CUTÂNEO OU ÓTICO, CONTEÚDO DE PÚSTULA	--	LÂMINA DE MICROSCÓPIO, ZARAGATOA NÃO ÉSTERIL, FITA-COLA		
RASPADOS CUTÂNEOS	RASPAGEM SUPERFICIAL ou PROFUNDA	--	LÂMINA DE MICROSCÓPIO LÂMINA DE BISTURI ÓLEO MINERAL		
BIOPSIA	PELE	--	RECIPIENTE	NÃO se admitem biopsias não	